

Neater Kopholder med bøjelig arm inkl. Neater Flexibelt sugerør med ventil



Neater kopholder med bøjelig arm, kan monteres på en kørestol, sengeramme eller andet rør. Kopholderen kan anvendes til Neater Drinker Metallic eller andet krus der passer i størrelsen. Kruset holdes sikkert af Neater kopholder. Neater bøjelig arm er en stabil og højdejusterbar arm til Neater Flexibelt sugerør med ventil. Ventilen i bunden i af sugerøret forhindrer tilbageløb af væsken og gør det lettere at suge. For at opnå maksimal fleksibilitet anvendes strips der kan genåbnes.

April 2020

Indhold

1 stk. Neater kopholder - 8,2 cm indvendig diameter med højdeindstillelig 75 cm lang bøjelig arm, 4 stk. 25 cm lange genåbenlige strips, 1 stk. Neater Fleksibelt sugerør med et stykke Neater solidt sugerør med ventil, 1 stk. velcro strop, 1 stk. sugerørsclips og 1 stk. sprøjte.

Sådan monteres og samles Neater kopholder bøjelig arm inkl. Neater Fleksibelt sugerør med ventil

Sæt en strip igennem de to øverste huller og en strip igennem de to nederste. Monter Neater kopholder på det ønskede sted.

Sørg for at Neater kopholder ikke drejer eller synker, til en for personen ubekvem eller ikke funktionel position. De medfølgende strips kan genåbnes, så der kan eksperimenteres med at fastgøre Neater kopholder forskellige steder. Ligeledes kan to strips sættes sammen til en, så det er muligt at forlænge strippen.

Du kan afkorte de enkelte strips og fjerne eventuelle skarpe kanter, for at få et pænt finish.

Tryk den ene ende af Neater Fleksibelt sugerør ind i plastik clipsen og fastgør Neater Fleksibelt sugerør til den bøjelige arm ved hjælp af velcro-stroppen.

Hvis ventilen ikke er påsat det medfølgende stykket af Neater Solidt sugerør, trykkes ventilen fast på den afrundede enden af sugerøret. (Enden af sugerøret kan blødgøres, ved at holde den under den varme hane).

Sugerørsclipsen sættes på Neater Solidt sugerør.

Neater Solidt sugerør skubbes ind i den ende af Neater Fleksibelt sugerør, som ikke er trykket ind i plastik Clipsen.

Bøj den bøjelige arm til den ønskede position, der passer til personen.

Plastik clipsen



Eksempel på montering af Neater kopholder med Neater bøjelig arm og Neater Fleksibelt sugerør med ventil

Montering på bagsiden af kørestolen.

Neater Drinkers Metallic (ikke inkluderet).

Eksempel på montering af Neater kopholder med Neater bøjelig arm og Neater Fleksibelt sugerør

Neater kopholderen med Neater bøjelig arm er her monteret til kørestolens armlæn. Neater Fleksibelt sugerør med ventil, holdes fast ved hjælp af velcro stropen, så det følger Neater bøjelige arm.

Neater kopholder med Neater bøjelig arm er monteret ved hjælp af strippene.

Tommelskruen justerer Neater bøjelige arms højde på Neater kopholderen.



Hjælp til det første sug – sugerøret kan fyldes op på forhånd med en sprøjte, hvis sugekraften er nedsat.

Sikkerhed i forbindelse med brug af krus i Neater kopholder med Neater bøjelig arm

- Bør kun anvendes til at drikke almindelige væsker.
- Væskerne må ikke være brændende varme.
- Bør ikke anvendes af personer med synkebesvær eller af personer der har tilbøjelighed til at få væske galt i halsen.
- Munden skal altid være højere end kruset. Ellers kan væsken ledes på afveje og medføre kvælning.
- Sprøjten er kun beregnet til rengøring og til at fylde sugerøret med.
- Alle dele skal rengøres før brug og tjekkes for opståede revner. Kontroller ligeledes om der er komponenter der har løsnet sig, dette må ikke forekomme, da det kan forårsage kvælning.
- Pas på ikke at stikke sugerøret ind i øjet eller ned i halsen.

Rengøring af Neater kopholder bøjelig arm inkl. Neater Fleksibelt sugerør med ventil

- Sugerøret og evt. den aftagne ventil lægges i sæbevand
- Tages op og lægges derefter i kogende vand – det/de skal skoldes
- Tag sprøjten og skyld sugerøret igennem med kogende vand
- Efterskylles grundigt med rent vand
- Hænges til tørre/afdrypning

Tilbehør og ekstraudstyr

- Neater Drinker Metallic
- Neater Fleksibelt sugerør **med** ventil
- Neater ventil til Neater Solidt sugerør
- Sugerørsclips
- Pokal krus eller Pokal glas

Jadea forhandler følgende drikkehjælpemidler:

Krus

- Neater Drinker inkl. 2 stk. 60 cm Neater Solidt sugerør med ventil
 - Pind "låsestykke" til Neater Drinker låg
- Neater Drinker Thermo inkl. 2 stk. 60 cm Neater Solidt sugerør med ventil
- Neater Drinker Metallic inkl. 2 stk. 60 cm Neater Solidt sugerør med ventil
- Neater Powered Drinker
 - Taske til Neater Powered Drinker
 - Ekstra genopladeligt batteri til Neater Powered Drinker

Neater sugerør

- Neater Solidt sugerør **med** ventil – 60 cm
- Neater Solidt sugerør **uden** ventil – 60 cm
- Neater Solidt sugerør **med** ventil – 120 cm
- Neater Solidt sugerør **uden** ventil – 120 cm
- Neater Fleksibelt sugerør **med** ventil
- Neater Fleksibelt sugerør **uden** ventil – 120 cm
- Neater ventil til Neater Solidt sugerør
- Neater bøjelig arm på bordbeslag inkl. Neater Fleksibelt sugerør med **eller** uden ventil
- Sugerørsclips

Kopholder

- Neater kopholder med strips montering
- Neater kopholder med bøjelig arm inkl. Neater Fleksibelt sugerør med **eller** uden ventil
- Neater kopholder fod

Neater Arm Support

- Neater Arm Support